

Desinfektionsmittelverträglichkeit

Schutzengel-Systeme: Transponder-Komponenten 2.15, 2.16, 2.17

Zur Einhaltung der hygienischen Standards Ihrer Einrichtung ist ein entsprechendes Reinigen und Desinfizieren der Schutzengel-Systeme Transponder selbstverständlich möglich.

Um eine optimale Anwendbarkeit und Funktionalität der Transponder auch nach einem Desinfektionsvorgang zu gewährleisten, hat die Firma Martin Elektrotechnik GmbH entsprechende Tests zur Desinfektionsmittelverträglichkeit der Transponder (hier: Baureihe 2.15, 2.16, 2.17 inkl. Bänder und Sicherheitsverschluss) durchgeführt. Die Tests umfassten hierbei die Komponenten, die in regelmäßigen Hautkontakt mit Bewohnern, Patienten oder dem Personal treten:

- Transponder-Gehäuse 2.15
- Raphael-MediBand
- Sicherheitsverschluss
- Baby-Transponder Gehäuse 2.16, 2.17
- Silikonband

Folgende getestete Desinfektionsmittel sind für eine Reinigung (Abwischen mit einem in Desinfektionsmittel getränkten Tuch) der Schutzengel-Systeme Transponder anwendbar:

- Schülke - Terralin Protect 2% Lösung
- Schülke - mikrocid AF liquid
- Schülke - perform
- Schülke – mikrocid sensitive liquid
- Mikrobac Tissues – Alkoholfreie Desinfektionstücher
- Ecolab – Incidin Plus

Bitte beachten Sie, dass die Lederband-Ausführungen aus Naturlleder bestehen. Die Anwendung von Desinfektionsmitteln löst nach und nach das natürliche Lederfett aus dem Material und macht dieses spröde. Auch Farbpigmente werden dabei herausgelöst und bleichen das Band aus. Wechseln Sie Lederbänder dann entsprechend aus, um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten. Um die Langlebigkeit zu fördern empfehlen wir daher eine Reinigung durch Abwischen der Transponder, jedoch keine Reinigungsbäder in Desinfektionsmittel.